

# MOBELI

® ROTH® Sanitärprogramme GmbH

D-72213 Altensteig

Kohlbergstraße 5

Tel (+49) 07453/9381-0 Fax -23

Mail : info@mobeli.de

Fallschutz für Stützgriff

Internet: www.mobeli.de

**Order. Nr. 1400662**

**als Zubehör für mobile QuattroPower Stützgriffe**  
(Bestell. Nr. 14002 65S, 14002 66S)



## **Bedienungsanleitung**

ROTH **MOBELI**® Fallschutz für Stützgriff

## Fallschutz für Stützgriff


Best. Nr. 1400662



**Unbedingt vor der Benutzung diese Informationen durchlesen und verstehen!**

### Lieferumfang:

2 Winkelgelenkaufnahmen, 2 Verbinder mit Zusatzplatz, 1 Teleskop Länge 2.

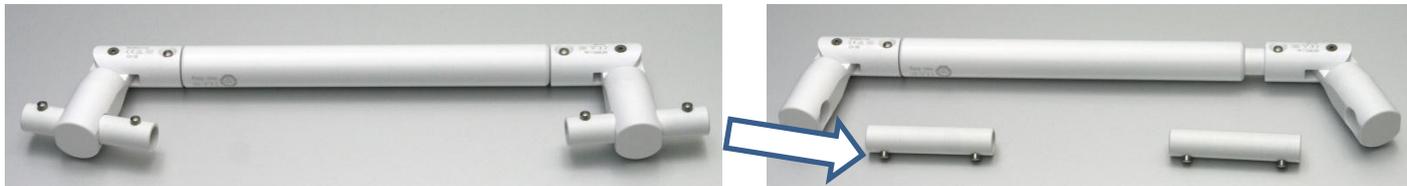

 **Darf nur als Zubehör für mobile ROTH® MOBELI® QuattroPower Stützgriffe Bestell Nr. 14002 65S, 14002 66S verwendet werden!**

Bedienungsinfo unbedingt aufbewahren und an weitere Benutzer weitergeben!

 **Vor Benutzung des Griffes muss die Bedieninfo des verstellbaren Griffes wegen weiterer Hinweise zur Sicherheit, Montage und Instandhaltung gründlich durchgelesen und verstanden werden. (Falls nicht vorhanden unbedingt anfordern!)**

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Fallschutz für instabile Patienten oder zur Stabilisierung des Oberkörpers.

 **Achtung!** Der Fallschutz darf nicht als Sitz verwendet werden. Es muss immer eine Hilfsperson anwesend sein.  
Den Benutzer nie alleine lassen!

### Montageinfo:



Schnappverschluss eindrücken und den Griff zerlegen.



Obere Stange nach hinten schwenken



Kurzen Verbinder gegen den langen Verbinder tauschen.



Winkelgelenkaufnahme mit Teleskop aufstecken, dazu vorher den Schnappverschluss eindrücken



Winkelgelenkaufnahme mit Teleskop Aufstecken, dazu vorher den Schnappverschluss eindrücken



Griff wieder zusammenstecken und nächsten Griff zerlegen



Griff zerlegen und kurzen Verbinder gegen den langen Verbinder austauschen und die Winkelgenkaufnahme wie auf der anderen Seite einstecken





Griffstange beim Teleskop  
Zerlegen indem vorher der  
Schnappverschluss eingedrückt  
wird und die Stange auseinan-  
dergezogen wird.



Stange abschwenken



Stange auf die Seite legen



**Der montierte Fallschutz im QuattroPower Stützgriff darf nur bei festem Halt der Schnellverriegler benutzt werden. Unbedingt vor der Benutzung sicheren Halt durch Ziehen am Stützgriff überprüfen.**

## **Instandhaltung:**

Reinigen Sie die Kardangelen-Adapter mit haushaltsüblichen, säurefreien Reinigungsmitteln wie Seifenlauge oder Spiritus.

Prüfen Sie den Fallschutz regelmäßig auf Funktionsfähigkeit.

Beschädigte Teile dürfen nicht benutzt werden!

## **Entsorgung:**

Die Geräteverpackung wird der Wertstoffwiederverwendung zugeführt. Die Metallteile werden der Altmetallverwertung zugeführt. Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Erfragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Weitere Infos im Internet unter der Adresse: [mobeli.de](http://mobeli.de)

Dabei das Video auf der rechten Seite bei Mobile Stützsysteme ansehen.

**MOBELI**®

**ROTH**® Sanitärprogramme GmbH

D-72213 Altensteig

Kohlbergstraße 5

Tel (+49) 07453/9381-0 Fax -23

Mail : [info@mobeli.de](mailto:info@mobeli.de)

Internet: [www.mobeli.de](http://www.mobeli.de)